

Déshabillage Combinaison

(Unités accueillant uniquement des patients COVID +)

Avant de sortir de l'unité



1

HDM
à
la SHA



2

Ouvrir la
fermeture éclair
entièrement



3

HDM
à
la SHA



4

Si utilisation capuche : glisser les
mains à l'intérieur (propre) et
enrouler la capuche sur elle-même



5

Glisser la main droite (propre)
sous la combinaison et retirer le
bras gauche



6

Avec la main droite (propre), tirer la
combinaison (torse) par l'intérieur et
glisser la main gauche (souillée) sous
la combinaison pour retirer le bras
droit sans toucher sa tenue (propre)



7

HDM
à
la SHA



8

Retirer le reste de la tenue,
inutile de se déchausser.
Déposer la combinaison dans
le double sac cristal
(blanchisserie)



9

HDM + avants bras
à la SHA

HDM : hygiène des mains
SHA : solution hydro-alcoolique